



HTS 100



ALTA PERFORMANCE PARA O MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO.

Monitoramento dos parâmetros fundamentais da esterilização, com segurança, confiabilidade e precisão.



IDEAL PARA:

VERIFICAR A
CORRETA PENETRAÇÃO
DO VAPOR.

ATENDER ÀS
BOAS PRÁTICAS DE
PROCESSAMENTO.

CONFERIR MAIS
SEGURANÇA AO
PROCESSO.

DETECTAR FALHAS NO
EQUIPAMENTO E NO ABASTECIMENTO
DAS UTILIDADES.

HTS 100

DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA HÍBRIDA E MULTIFUNCIONAL, QUE PROMOVE O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DOS SEGUINTE TESTES:



Teste Bowie&Dick
(7Kg)



Teste Desafio com indicador químico
(liberador de carga)

Dispositivo para uso exclusivo com indicadores Cisa.

• Autonomia

Flexibilidade e autonomia para o usuário na utilização que mais se adapta às necessidades do dia a dia.

• Tecnologia em favor da natureza

A tecnologia do dispositivo HTS 100 promove considerável economia de recursos naturais no processo de validação da esterilização. O HTS 100 reduz em até 99,8% a geração de resíduos, quando comparado aos testes tradicionais.

• Rastreabilidade

Indicadores com área específica para registrar as informações necessárias para rastrear o processo.

• Patente requerida

A patente torna o HTS Cisa um produto único, diferenciando-o dos outros PCD's do mercado.

• Manutenção do dispositivo

Dispositivo de manutenção fácil e rápida. O HTS 100 necessita de limpeza de rotina e substituição do anel de vedação a cada 4 meses. O kit contém dois anéis de vedação extras, totalizando 12 meses de uso sem custos adicionais.



SOLUÇÕES PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO COM HTS 100



SMP (Sistema de Monitoramento de Processo)

- Indicador químico tipo 2 de uso exclusivo no dispositivo HTS 100.
- Realiza o monitoramento de carga e simula uma condição crítica de processo, quando utilizado no HTS.
- Avalia a remoção de ar, a correta penetração do vapor saturado e a completa eliminação de microrganismos viáveis.
- Em conformidade com a norma ISO 11140-1.
- Caixa com 250 unidades / medida 90 x 70 x 30 mm / peso 105 g.



Bowie&Dick para HTS 100

- O indicador B&D (7 kg) desenvolvido para uso exclusivo no dispositivo HTS 100 possui tamanho reduzido quando comparado aos tradicionais, o que facilita a logística e diminui espaço de armazenamento.
- Indica com precisão a completa e adequada remoção do ar e penetração do vapor.
- Em conformidade com a norma ISO 11140-4.
- Caixa com 50 unidades / medida 76 x 35 x 28 mm / peso 23 g.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



<https://www.cisabrasile.com.br/pt/produto/hts-100>

As informações contidas nesta lâmina
podem sofrer alterações sem aviso
prévio. Reservados todos os direitos.
CISA002/MAR2023